

10

Placez les tubes pleins et le pot dans le sachet double poche.

Complétez le formulaire de demande d'examen :

Indiquer **Date** et **Heure** de recueil

Cocher les cases correspondant à la situation de l'enfant.

Insérez ce formulaire et l'ordonnance dans la pochette externe du sachet

Après le recueil, maintenir les tubes à température ambiante (ne pas réfrigérer)

11



Laboratoires
Groupe Analysis

Apportez le sachet au laboratoire ou déposez-le dans un point de collecte.

Délai de transmission

Recommandé < 24H




Urines « nourrisson »

NOTICE D'EMPLOI

A lire impérativement avant utilisation

Chez le jeune enfant, le recueil d'urines par poche urinaire ne doit être effectué que si le prélèvement au jet au cours d'une miction n'est pas possible.

Utiliser un modèle de poche adapté au sexe de l'enfant

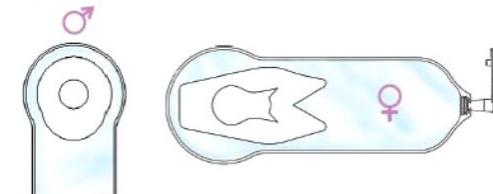

Ne pas utiliser en présence de signes de détérioration ou si la date de péremption de la poche ou des tubes est dépassée

Autre notice disponible sur www.analysis.fr, rubrique « Guide des analyses » :

- ⇒ Recueil d'urines : ECBU, Chlamydia, Mycobactéries etc.
- ⇒ Recueil d'urines chez le patient sondé

*Laboratoires du groupe Analysis
Épinal Saut le Cerf - Épinal centre
Remiremont - Thaon les Vosges
Golbey - Charmes*

Mode d'emploi du kit « ECBU nourrisson (poche, pot+tubes) »

Étapes essentielles pour assurer la qualité du résultat

Attention, le tube bouchon vert contient un milieu de transport qui peut irriter la peau, les yeux ou les muqueuses. Ne jamais ouvrir les tubes.

En cas de contact, se laver abondamment la peau ou la muqueuse qui a été en contact avec le produit.

1 Se laver très soigneusement les mains.

Mettre l'enfant sur le dos, les jambes écartées.


Nettoyer soigneusement la région uro-génitale de l'enfant à l'eau et au savon neutre.

La peau de l'enfant doit être propre, sèche, non recouverte de poudre ou de crème et ne présenter aucune irritation.

Ouvrir le sachet contenant la poche, et s'assurer que le bouchon d'écoulement est correctement fermé.



Détacher et jeter la découpe centrale. Retirer doucement et complètement le papier protecteur qui protège l'adhésif.

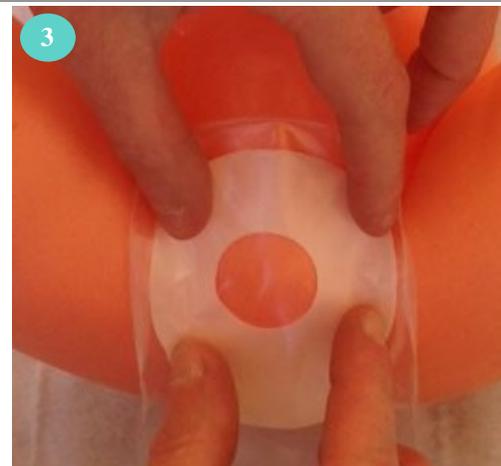

Appuyer la poche autour de l'orifice urinaire de l'enfant en appuyant sur l'adhésif pour garantir une bonne adhérence sur toute la surface.



Max.


Si absence d'urines après 30 min, recommencer avec 1 nouvelle poche.



Se laver soigneusement les mains.

Enlever la poche en soulevant un coin de la partie adhésive et détacher doucement.

Coller l'adhésif face contre face.

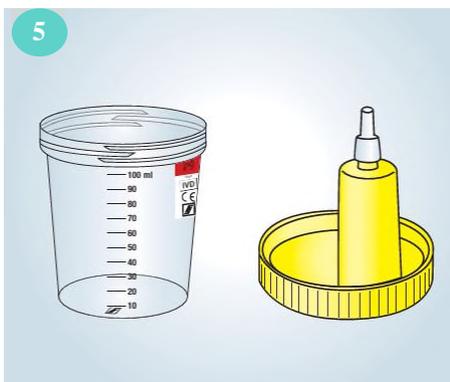

Dévisser le couvercle du pot et posez-le sur une surface plane.

Ne pas toucher la canule du couvercle.



Prendre la poche, ôter le bouchon d'écoulement et verser la totalité des urines dans le pot.



Replacer le couvercle (bien le visser). A l'aide de la graduation, notez le volume d'urine :

< 10 ml ⇒ ne pas remplir les tubes, apporter le flacon **dans les 2 heures** au laboratoire

> 10 ml ⇒ retirer l'étiquette de protection (ne pas la jeter) et passer à l'étape suivante




Volume **> 20 ml** :

Pousser le petit tube bouchon **beige** dans l'orifice de transfert. Attendre la fin du remplissage puis passer au grand tube bouchon **vert**.

Volume **entre 10 et 20 ml** :

Ne remplir que le grand tube bouchon **vert**.

Replacer l'étiquette de protection.

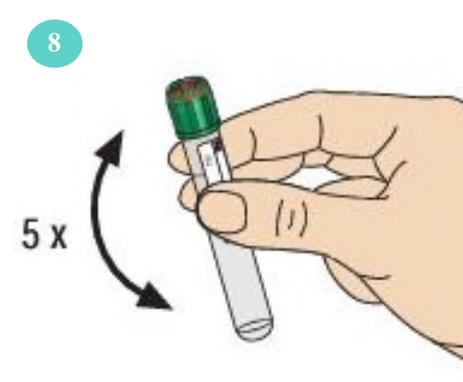

Retourner 5 fois les tubes

Indiquer sur le pot et sur chaque tube Nom-Prénom et date de naissance