



LABORATOIRES AGRÉÉS

TRISOMIE 21

GÉNÉTIQUE

FIV

Règles d'utilisation des Boîtes de Prélèvement sanguins ANALYSIS

Les boîtes livrées doivent être utilisées dans les 4 mois.

Ne pas stocker dans le véhicule sur une période prolongée en cas de température extérieure extrême (< 5° et > 25 °c).

Ne pas exposer au soleil.

Matériel non fourni : Garrot, Container d'élimination des DASRI



Les boîtes pour prélèvements sanguins contiennent :

- . Les différents types de tubes, une aiguille Sécurité Eclipse®, un corps de pompe, un sachet individuel avec un tampon alcoolisé, un coton et un pansement.
- . Une demande d'examen vierge et une demande de tiers-payant



Après remplissage, positionner les tubes dans leur compartiment.

L'aiguille usagée, neutralisée par le système de protection doit être éliminée sans la désolidariser du corps de pompe dans un container à DASRI.



En l'absence de container, replacer le système de prélèvement aiguille tournée vers le bas dans son compartiment.

Dérogation autorisée uniquement pour les aiguilles usagées munies d'une protection enclenchée de manière irréversible.



Après avoir repositionné le couvercle transparent, insérer les documents dans la boîte puis la refermer.



Après utilisation, les boîtes doivent être conservées entre 17 et 23 °C jusqu'à la prise en charge par le laboratoire

Les boîtes sont conformes à la réglementation autorisant le transport routier des échantillons biologiques. Elles doivent être maintenues en position verticale durant le transport.

Un formulaire de demande de matériel est remis avec chaque lot de boîtes. A transmettre au laboratoire pour toute nouvelle commande de boîtes.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le laboratoire au 03 29 68 04 04

11, Chemin de la belle au bois dormant | www.analysis.fr | contact@analysis.fr
88000 ÉPINAL | SELARL Capital 301 518 €
Tél. 03 29 68 04 04 - Fax. 03 29 68 49 59 | RCS Epinal - SIREN 308 820 927