



LABORATOIRES AGRÉÉS

TRISOMIE 21

GÉNÉTIQUE

FIV

## Identification et Traçabilité des prélèvements

Les échantillons doivent être identifiés par le préleveur avec l'ensemble des caractères suivants :

- **Sexe (M./Mlle/Mme)**
- **Nom, Prénom + Nom de naissance**
- **Date de naissance**

Un jeu d'étiquettes pré-identifiées est adressé systématiquement au patient afin de faciliter l'identification des prélèvements ultérieurs.

**Règle N° 1 : Ne jamais coller les étiquettes sur les tubes avant le prélèvement.**

**Règle N° 2 : Vérifier les données inscrites sur les étiquettes** en demandant au patient de décliner lui-même son identité. Si des modifications sont nécessaires, le PRELEVEUR corrige directement sur les étiquettes avant de les coller sur chaque tube.

**Règle N° 3 : Particularités des Groupes sanguins et RAI**

**Ne jamais utiliser d'étiquette pré-imprimée pour les Groupes sanguins et RAI.** Le préleveur écrit les informations directement sur le tube ou sur une étiquette vierge avant de la coller sur le tube à partir de l'identité complète épelée par le patient.

L'identité ne doit pas être recopiée à partir de documents annexes (ordonnance, étiquettes, ...).

Il doit être précisé au patient que l'identité déclinée doit correspondre à ses pièces d'identité (carte d'identité, passeport, titre de séjour).

Le **NOM DE NAISSANCE** y figure **systématiquement**.

*Exemples :*

*Mme Catherine MARTIN **née** DUPONT le 11/11/11*

*pour une femme mariée ou ayant conservé le patronyme d'un ex-époux.*

*Mlle Catherine **née** DUPONT le 11/11/11*

*pour une femme non mariée*