



LABORATOIRES AGRÉÉS

TRISOMIE 21

GÉNÉTIQUE

FIV

Analyses avec délai pré-analytique particulier

Le délai pré-analytique correspond au délai entre le prélèvement et le début de l'analyse
Rappel : Le délai pré-analytique maximum accepté est de 8h sauf liste ci-dessous

Examens réalisés au laboratoire Analysis	Délai pré-analytique max (15-25°C) (Echantillon primaire)
Urines pour ECBU percutées dans tube BD	48 h
Urines pour ECBU non percutées	2 h
Albumine/Sucre,	8 h
Drogues sur urines	Prélèvement au laboratoire
NF, Plaquettes	24 h
INR / TP	
Folates (vit B9) / vitamine B12 (à l'abri de la lumière dans boîte de prélèvement)	
Lithium	
PTH	6 h
CA 15-3	
TCA (en l'absence de traitement par HNF)	
TCA sous HBPM Héparinémie (Activité anti-Xa) sous HBPM	6 h
TCA sous HNF Héparinémie (Activité anti-Xa) sous HNF	2 h sur citrate ou 6 h sur tube CTAD (disponible sur demande)
Paludisme	2 h
LDH	2 h
Gaz du sang	30 min à T° ambiante – 1 heure maximum dans glace fondante
Acide lactique (lactates)	Prélèvement recommandé au laboratoire
Calcium ionisé	30 min à T° ambiante – 3 heures maximum entre +2 et +8°C Prélèvement recommandé au laboratoire
Méthémoglobine	30 min à T° ambiante – 2 heures maximum entre +2 et +8°C Prélèvement recommandé au laboratoire
Carboxyhémoglobine (Monoxyde de carbone)	30 min à T° ambiante – 72 heures maximum entre +2 et +8°C
Ammoniémie	30 min au froid – Prélèvement recommandé au laboratoire
Cryoglobuline – cryofibrinogène – Agglutinines froides	Prélèvement exclusivement au laboratoire à 37 °
Examens sous-traités	Consulter le manuel de prélèvement du laboratoire (site internet : www.analysis.fr)

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le laboratoire au 03 29 68 04 04

11, Chemin de la belle au bois dormant | www.analysis.fr | contact@analysis.fr
88000 ÉPINAL | SELARL Capital 301 518 €
Tél. 03 29 68 04 04 - Fax. 03 29 68 49 59 | RCS Epinal - SIREN 308 820 927